


# NycoCard®: U-ALBUMIN

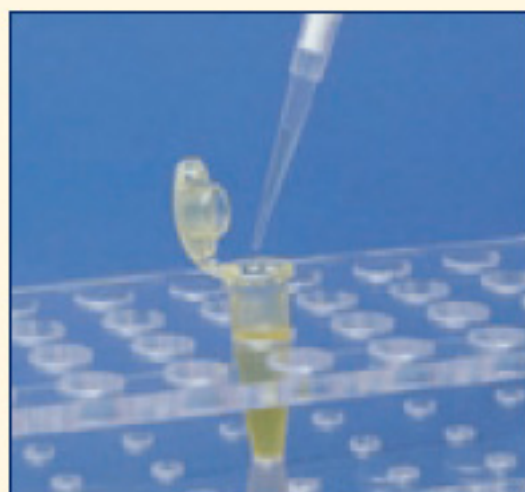

**1**  
Dodać 50  $\mu$ L moczu do probówki z R1/Cieczą rozcieńczającą. Dobrze wymieszać.



**2**  
Nałożyć 50  $\mu$ L rozcieńczonego moczu na TD/Przyrząd testowy. Należy pozwolić rozcieńczonej próbce wsiąknąć całkowicie w membranę (około 50 sek.).



**3**  
Dodać 50  $\mu$ L R2/Mieszanki sprzężonej do przyrządu testowego. Pozwolić mieszaninie wsiąknąć całkowicie w membranę (około 50 sek.).



**4**  
**Natychmiast** dodać 50  $\mu$ L R3/Roztworu płuczącego do przyrządu testowego. Pozwolić roztworowi płuczącemu całkowicie wsiąknąć w membranę (około 50 sek.).



**5**  
Odczytać wyniki za pomocą NycoCard® Reader II.

## Uwaga!

R1/Ciecz rozcieńczająca musi mieć temperaturę pokojową (15 – 25 °C) podczas używania.

## Uwaga!

Zmienić końcówkę pipety. Nie dopuszczać do powstawania pęcherzyków powietrza.

## Uwaga!

Zmienić końcówkę pipety. Nie dopuszczać do powstawania pęcherzyków powietrza.

## Uwaga!

Zmienić końcówkę pipety. Nie dopuszczać do powstawania pęcherzyków powietrza.

## Uwaga!

Przed użyciem skalibrować aparat. Wybrać menu U-Albumin. Odczytać wyniki przed upływem 5 minut.